


PUPILLENDISTANZ-MESSSCHABLONE

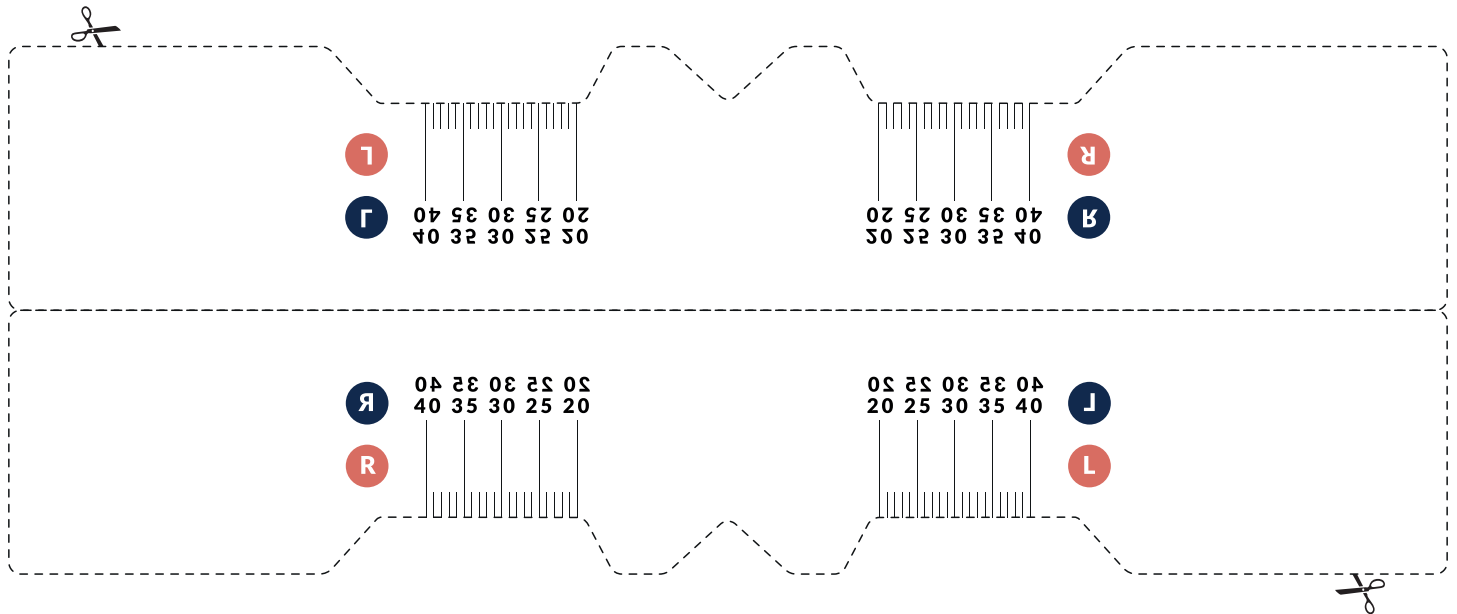

BEMESSEN SIE IHRE PUPILLENDISTANZ

1. Drucken Sie diese Seite aus (Wählen Sie „Tatsächliche Größe drucken“ bzw. „print actual size« bei den Druckeinstellungen).
2. Prüfen Sie nach, ob der Ausdruck originalgetreu ist (vergleichen Sie es mit einem Lineal).
3. Schneiden Sie die Schablone an den Markierungen aus und falten Sie sie in der Mitte.
4. Bemessen Sie Ihre Pupillendistanz. Stellen Sie sich ca. einen halben Meter von dem Spiegel entfernt hin und halten Sie die Schablone mit der ausgeschnittenen Stelle am Nasensteg. Schließen Sie ihr linkes Auge und lesen Sie den Wert an der Skala ab – als Bemessungspunkt dient die Mitte Ihrer rechten Augenpupille. Wiederholen Sie den Vorgang für Ihr anderes Auge.
5. Geben sie die Messwerte in unsere Website ein: www.crulle.de

TESTSCHABLONE

